


# HÖRHJÄLPMEDEL

## SENNHEISER EK 2020-D-II

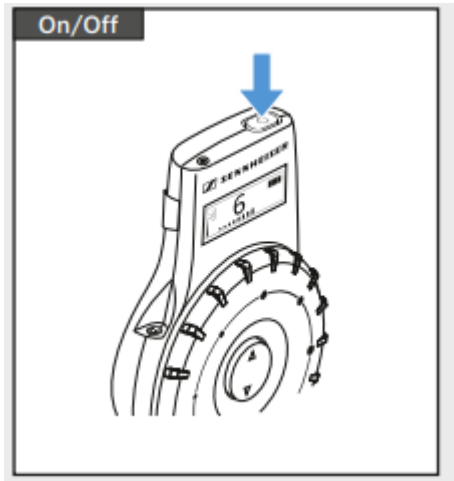

Tryck på ON-knappen (se blå pil)



### KANAL

Byt kanal med hjälp av den runda knappen i mitten av hjulet.

Vävenscenen = KANAL 1

Öppna foajén = KANAL 2

Vald kanal visas i displayen.

### VOLYM

Justera volymen till önskad nivå genom att vrida på det stora silverfärgade hjulet.

Volymen indikeras med streck i displayen.

### SLADD

Sladden är själva antennen och hängs runt halsen för bästa signal. Sätt hörapparat till T-slinga. Om T-slinga saknas kan du i stället koppla vanliga hörlurar till utrustningen.

